

### Gebrauchsanweisung Rutschbrett RBM 700SP

1. aus der Wandhalterung nehmen
2. vor das Bett oder Türrahmen mit der glatten Seite nach unten ablegen
3. bettlägerische Patienten mit Rettungstuch / Evakuierungstuch auf das bereitliegende Rutschbrett ziehen
4. Rutschbrett mit dem rechten oder linken Fuß arretieren
5. Patienten mittels Rettungstuch / Evakuierungstuch / Rutschbrett aus dem Zimmer / Brandabschnitt evakuieren

### Technische Daten:

Material: PVC

Brandverhalten: DIN 4102 B1

Maße: 70 x 30 cm.

Belastbarkeit: 200 kg.

Farbe: signalrot

Antirutschstreifen: signalgelb

VE 1 Stück.

